



دستورالعمل استفاده کات ارج



Arj Infant bed User Manual

UMDNS: 12027 Class: A

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۲۷۱۸۲ نمابر: ۰۲۶-۳۲۸۲۲۰۷۸ همراه: ۰۹۱۲-۳۲۰۶۴۸۲ واتس اپ: ۰۹۱۰-۳۲۰۶۴۸۲

www.amed.ir



فهرست

- ۳ معرفی شرکت
- ۴ محصولات شرکت
- ۵ معرفی محصول
- ۶ آموزش نصب و استفاده
- ۷ نگهداری
- ۷ مشخصات
- ۸ معانی برچسب های محصول

معرفی شرکت

شرکت ارمغان رفاه جامع (ارج) با **ماموریت** تولید و توزیع تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی در سال ۱۳۹۳ پا به عرصه تولید تجهیزات پزشکی نهاده است.

چشم انداز این شرکت، کسب مقام برترین تولید کننده تجهیزات پزشکی بخش نوزادان ایران در سال ۱۴۰۴ بوده و **اهداف** شرکت برای سال جاری ایجاد تنوع در محصولات و توسعه بازار تعیین شده است.

با توجه به تغییرات گسترده و سریع در بازار کسب و کار و جهت رقابت با کالاهای خارجی، این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی و بهره وری را سرلوحه خود قرار داده و با بهبود فرآیندها سعی در کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات خود دارد تا بتواند با ارائه محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان خود را افزایش دهد و به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد.

این شرکت دارای واحد R&D بوده و طی دو سال گذشته بر روی پروژه های متفاوت جهت توسعه محصولات شرکت و همچنین اضافه نمودن محصولات جدید به لیست محصولات شرکت فعالیت نموده است.

از دستاوردهای این شرکت، اخذ گواهی ISO-13485 در سیستم مدیریت کیفیت و ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور است.

به امید آنکه شما عزیزان نیز با ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در راه بهبود و ارتقای هرچه بیشتر یاری نمایید.



IMED
National Medical
Device Directorate IR.IRAN



محصولات شرکت

- ❖ تخت احیاء نوزاد
- ❖ گرمکن ریکآوری نوزاد (وارمرکات)
- ❖ وارمر نوزاد (گرمکن)
- ❖ فتوترای اینتنزیو (اینتنسیو)
- ❖ فتوترای بیمارستانی (ایستاده)
- ❖ فتوترای خانگی (قابل حمل)
- ❖ چشم بند فتوترای
- ❖ کات نوزاد (تخت بستری) در مدل های:
 - ارج
 - ارمغان
 - رفاه
 - جامع
 - آریو
- ❖ اکسیژن هود نوزاد (اکسی هود) در مدل های:
 - استوانه ای (کوچک، متوسط و بزرگ)
 - زاویه دار (با دریچه دسترسی و بدون دریچه)
- ❖ فیکسچر سر نوزاد (هد هولدر)

برای مشاهده کاتالوگ، مشخصات کامل و قیمت بروز محصولات به سایت ما مراجعه فرمایید

www.amed.ir

معرفی محصول

کات نوزاد (تخت بستری نوزاد) در بخش نوزادان (NICU) بیمارستان ها جهت جابجایی و بستری نمودن نوزادان مورد استفاده قرار می گیرد.

کات ارچ دارای یک لگن شفاف با قابلیت تغییر زاویه در ۳ حالت، جهت قرارگیری و دسترسی راحت تر به نوزاد می باشد. همچنین محفظه ای از جنس ABS برای قرارگیری وسایل جانبی نوزاد از قبیل حوله، لباس و ... تعبیه شده است.

بدنه کات نوزاد از جنس استیل بوده و از رنگ پودری الکترواستاتیک برای رنگ کاری بدنه استفاده شده است که از کیفیت بسیار بالایی در مقاومت فیزیکی برخوردار است.

چرخ ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده که قابلیت حرکت و چرخش آسان و بدون صدا را فراهم می سازد؛ به علاوه قفل های تعبیه شده بر روی چرخ های عقب امکان ثابت نگه داشتن تخت را به طور کامل ایجاد می کند.

• Part



• Necessary Tools



1.



2.



3.



4.










نگهداری

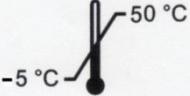
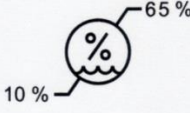
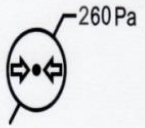
برای قرار دادن نوزاد جدید درون کات نوزاد می بایست محل قرارگیری نوزاد تمیز و ضدعفونی گردد؛ برای ضدعفونی از پارچه تمیز آغشته به محلول ضدعفونی کننده استفاده نمایید. همچنین روکش تشک قابل شستشو و استفاده مجدد می باشد.

مشخصات

100cm	طول
47cm	عرض
95cm	ارتفاع
12.5kg	وزن

معانی برچسب های محصول

محل نصب	معنی	برچسب	ردیف
کارتن بسته بندی	محافظت از نور آفتاب/گرما		۱
کارتن بسته بندی	دور از رطوبت نگهداری شود		۲
کارتن بسته بندی	برچسب هشدار بر روی کارتن محصول	با احتیاط حمل شود شکستنی است	۳
کارتن بسته بندی	نمایش سمت بالای محصول		۴
کارتن بسته بندی	شکستنی است		۵
کارتن بسته بندی	لوگو شرکت		۶
کارتن بسته بندی	بیش از ۳ کارتن بر روی هم قرار نگیرد		۷
بدنه دستگاه	برچسب شناسایی کات نوزاد	 <p> اسمان رفاه جامع (ارج) تولید کننده تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی بیمارستانی Name Infant Bed Model : 650 SN 91059001 2020-12 Karaj - IRAN Tel : 026 - 32827182 Fax : 026 - 32822078 Patient weight: 20 Kg Safe working load: 30 Kg </p>	۸

کارتن بسته بندی	نام محصول و تائیدیه کنترل کیفیت	Infant Bed Quality Control OK	۹
کارتن بسته بندی	محدوده دمایی جهت حمل و نقل و انبار دستگاه		۱۰
کارتن بسته بندی	محدوده رطوبت جهت حمل و نقل و انبار دستگاه		۱۱
کارتن بسته بندی	محدوده فشار جهت حمل و نقل و انبار دستگاه		۱۲