



## دستورالعمل استفاده کات رفاه



### Refah Infant bed User Manual

**UMDNS: 12027      Class: A**

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۲۷۱۸۲      نمابر: ۰۲۶-۳۲۸۲۲۰۷۸      همراه: ۰۹۱۲-۳۲۰۶۴۸۲      واتس اپ: ۰۹۱۰-۳۲۰۶۴۸۲

[www.amed.ir](http://www.amed.ir)



## فهرست

۳	معرفی شرکت
۴	محصولات شرکت
۵	معرفی محصول
۶	آموزش نصب و استفاده
۷	نگهداری
۷	مشخصات
۸	معانی برجسب های محصول

## معرفی شرکت

شرکت ارمغان رفاه جامع (ارج) با مأموریت تولید و توزیع تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی در سال ۱۳۹۳ پا به عرصه تولید تجهیزات پزشکی نهاده است.

چشم انداز این شرکت، کسب مقام برترین تولید کننده تجهیزات پزشکی بخش نوزادان ایران در سال ۱۴۰۴ بوده و اهداف شرکت برای سال جاری ایجاد تنوع در محصولات و توسعه بازار تعیین شده است.

با توجه به تغییرات گسترده و سریع در بازار کسب و کار و جهت رقابت با کالاهای خارجی، این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی و بهره وری را سرلوحه خود قرار داده و با بهبود فرآیندها سعی در کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات خود دارد تا بتواند با ارائه محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان خود را افزایش دهد و به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد.

این شرکت دارای واحد R&D بوده و طی دو سال گذشته بر روی پروژه های متفاوت جهت توسعه محصولات شرکت و همچنین اضافه نمودن محصولات جدید به لیست محصولات شرکت فعالیت نموده است.

از دستاوردهای این شرکت، اخذ گواهی ISO-13485 در سیستم مدیریت کیفیت و ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور است.

به امید آنکه شما عزیزان نیز با ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در راه بهبود و ارتقای هر چه بیشتر یاری نمایید.



## محصولات شرکت

- ❖ تخت احیاء نوزاد
- ❖ گرمکن ریکاوری نوزاد (وارمرکات)
- ❖ وارمر نوزاد (گرمکن)
- ❖ فتوترایی اینتنزیو (اینتنسیو)
- ❖ فتوترایی بیمارستانی (ایستاده)
- ❖ فتوترایی خانگی (قابل حمل)
- ❖ چشم بند فتوترایی
- ❖ کات نوزاد (تخت بستری) در مدل های:
  - ارج
  - ارمغان
  - رفاه
  - جامع
  - آریو
- ❖ اکسیژن هود نوزاد (اکسی هود) در مدل های:
  - استوانه ای (کوچک، متوسط و بزرگ)
  - زاویه دار (با دریچه دسترسی و بدون دریچه)
- ❖ فیکسچر سر نوزاد (هد هولدر)

برای مشاهده کاتالوگ، مشخصات کامل و قیمت بروز محصولات به سایت ما مراجعه فرمایید

[www.amed.ir](http://www.amed.ir)

## معرفی محصول

کات نوزاد (تخت بستری نوزاد) در بخش نوزادان (NICU) بیمارستان ها جهت جابجایی و بستری نمودن نوزادان مورد استفاده قرار می گیرد.

بدنه کات نوزاد از جنس استیل بوده و از رنگ پودری الکترواستاتیک برای رنگ کاری بدنه استفاده شده است که از کیفیت بسیار بالایی در مقاومت فیزیکی برخوردار است.

چرخ ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده که قابلیت حرکت و چرخش آسان و بدون صدا را فراهم می سازد؛ به علاوه قفل های تعبیه شده بر روی چرخ های عقب امکان ثابت نگه داشتن تخت را به طور کامل ایجاد می کند.

• Part



• Necessary Tools



1.



2.








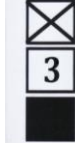

## نکهداری

برای قرار دادن نوزاد جدید درون کات نوزاد می بایست محل قرارگیری نوزاد تمیز و ضدعفونی گردد؛ برای ضدعفونی از پارچه تمیز آغشته به محلول ضدعفونی کننده استفاده نمایید. همچنین روکش تشک قابل شستشو و استفاده مجدد می باشد.

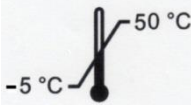
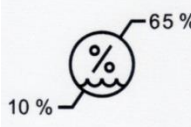

## مشخصات

95cm	طول
47cm	عرض
100cm	ارتفاع
9kg	وزن

## معانی برچسب های محصول

محل نصب	معنی	برچسب	ردیف
کارتن بسته بندی	محافظت از نور آفتاب/گرما		۱
کارتن بسته بندی	دور از رطوبت نگهداری شود		۲
کارتن بسته بندی	برچسب هشدار بر روی کارتین محصول	با احتیاط حمل شود شکستنی است	۳
کارتن بسته بندی	نمایش سمت بالای محصول		۴
کارتن بسته بندی	شکستنی است		۵
کارتن بسته بندی	لوگو شرکت		۶
کارتن بسته بندی	بیش از ۳ کارتین بر روی هم قرار نگیرد		۷
بدنه دستگاه	برچسب شناسایی کات نوزاد	 <p>ارمغان رفته جامع ( ارج ) تولید کننده تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی بیمارستانی</p> <p>Name Infant Bed Model : 650</p> <p>SN 91059001 2020-12</p> <p>Karaj - IRAN پلاک ۴۳۸ - بخش عباسی - خیابان شهید بهشتی Patient weight: 20 Kg Safe working load: 30 Kg Tel : 026 - 32827182 www.Amed.ir Fax : 026 - 32822078</p>	۸



کارتن بسته بندی	نام محصول و تأییدیه کنترل کیفیت	Infant Bed Quality Control OK	۹
کارتن بسته بندی	محدوده دمایی جهت حمل و نقل و انبار دستگاه		۱۰
کارتن بسته بندی	محدوده رطوبت جهت حمل و نقل و انبار دستگاه		۱۱
کارتن بسته بندی	محدوده فشار جهت حمل و نقل و انبار دستگاه		۱۲