



Infant Bet User Manual

دستورالعمل استفاده

تخت بستری نوزاد

مدل جامع ۶۵۰

UMDNS : 18393 Class : A

تلفن : ۳۲۸۲۷۱۸۲ (۰۲۶) نمابر : ۳۲۸۲۲۰۷۸ (۰۲۶) همراه : ۳۲۰۶۴۸۲ - ۰۹۱۲



09103206482



09103206482



Arj.med

فهرست

صفحه	عنوان
۱	معرفی شرکت
۲	معرفی محصولات
۳	معرفی دستگاه
۴	نصب و راه اندازی
۵	نگهداری دستگاه
۵	عمر مفید
۶	عیب یابی
۶	مشخصات دستگاه
۷	فهرست برچسب های محصول

شرکت ارمغان رفاه جامع (ارج) با **ماموریت** تولید و توزیع تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی در سال ۱۳۹۳ پا به عرصه تولید تجهیزات پزشکی نهاده است .
چشم انداز این شرکت؛ کسب مقام برترین تولید کننده تجهیزات پزشکی بخش نوزادان ایران در سال ۱۴۰۰ می باشد.

اهداف شرکت برای سال جاری ایجاد تنوع در محصولات و توسعه بازار تعیین شده است .

با توجه به تغییرات گسترده و سریع در بازار کسب و کار و جهت رقابت با کالاهای خارجی؛ این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی و بهره وری را سرلوحه خود قرار داده و با بهبود فرآیندها سعی در کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات خود دارد تا بتواند با ارائه محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان خود را افزایش دهد و به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد .

این شرکت دارای واحد R&D می باشد و طی دو سال گذشته بر روی پروژه های متفاوت جهت توسعه محصولات شرکت و همچنین اضافه نمودن محصولات جدید به لیست محصولات شرکت فعالیت نموده است.

از دستاوردهای این شرکت ، اخذ گواهی ISO 13485 در سیستم مدیریت کیفیت و ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد .

به امید آنکه شما عزیزان نیز با ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ؛ ما را در این راه یاری نمایید .

معرفی محصولات

- ۱) فتوتراپی نوزاد (بیمارستانی مدل ۴۳۵)
- ۲) فتوتراپی نوزاد (مدل خانگی)
- ۳) فتوتراپی اینتنزیو (مدل ۵۱۰)
- ۴) اکسیژن هود مدل استوانه ای (ابعاد کوچک ، متوسط و بزرگ)
- ۵) اکسیژن هود مدل زاویه دار (با دریچه دسترسی و بدون دریچه دسترسی)
- ۶) هد هولدر (کد 018)
- ۷) چشم بند فتوتراپی نوزاد (در دو اندازه بزرگ و کوچک)
- ۸) کات /تخت بستری نوزاد مدل ارج (کد 610)
- ۹) کات /تخت بستری نوزاد مدل ارمغان (کد 620)
- ۱۰) کات /تخت بستری نوزاد مدل رفاه (کد 630)
- ۱۱) کات /تخت بستری نوزاد مدل آریو (کد 640)
- ۱۲) کات /تخت بستری نوزاد مدل جامع (کد 650)
- ۱۳) وارمر نوزاد (مدل ۲۱۰)
- ۱۴) وارمر کات
- ۱۵) تخت احیاء نوزاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت محصولات به سایت این شرکت به آدرس

www.Amed.ir مراجعه فرمایید .

کات نوزاد(تخت بستری نوزاد) در بخش نوزادان (NICU) بیمارستان ها جهت جابه جایی و بستری نمودن نوزادان مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای دیواره ها شفاف جهت تحت نظر داشتن نوزاد می باشد. جهت معاینه نوزاد دیواره ها قابل باز شدن می باشد. به دلیل اندازه بزرگ تشک امکان بستری هم زمان چهار نوزاد میسر می باشد.

بدنه کات نوزاد از جنس استیل بوده و از رنگ پودری الکترواستاتیک برای رنگ کاری بدنه استفاده شده است که از کیفیت بسیار بالایی در مقاومت فیزیکی برخوردار است.

چرخ ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده که قابلیت حرکت و چرخش آسان و بدون صدا را فراهم می سازد؛ همچنین قفل های تعبیه شده بر روی چرخ های عقب امکان ثابت نگه داشتن تخت را به طور کامل ایجاد می کند.

• Part



• Necessary Tools



1.



2.




3.



4.



5.

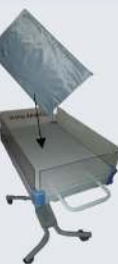

نگهداری دستگاه

برای قرار دادن نوزاد جدید درون کات نوزاد می بایست محل قرارگیری نوزاد تمیز و ضدعفونی گردد.

برای ضدعفونی از پارچه تمیز آغشته به محلول ضدعفونی کننده استفاده نمایید.
همچنین روکش تشک قابل شستشو و استفاده مجدد می باشد.

عمر مفید

عمر مفید این تجهیز ۱۰ سال می باشد که در این مدت قطعات و لوازم یدکی دستگاه توسط شرکت مهندسی پزشکی ارج تامین می گردد.

عیب یابی

در صورت هرگونه مشکل و یا نیاز به تعویض قطعات با بخش خدمات پس از فروش شرکت مهندسی پزشکی ارج تامین می گردد.

مشخصات دستگاه

ابعاد

طول : 76 cm

عرض : 47 cm

ارتفاع : 100 cm

وزن

دستگاه : 24 kg

بسته بندی : 26.5 kg

فهرست برچسب های محصول تخت بستری نوزاد			
برچسب	محل نصب	نام برچسب	ردیف
	بدنه دستگاه	لوگو شرکت و شماره سریال	۱
	کارتن	علائم هشدار بر روی کارتن محصول	۲
	کارتن	علائم هشدار بر روی کارتن محصول	۳

